



البدلة القضيبية الإصطناعية ZSI 100 معلومات للمرضى




ZSI
Zephyr Surgical Implants
Version 2 - Nov. 2020

www.zsimplants.ch

طريقة عمل بدلة ZSI 100 القضيبيّة


1- القضيب في حالة عدم-إنتصاب

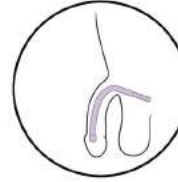

2- بإستخدام يد وحدة، قم بإجلال القضيب إلى حالة الإنتصاب



3- القضيب في حالة إنتصاب

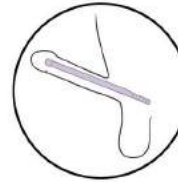


4- بعد الإنتهاء، قم بإعادة القضيب إلى حالة عدم-الإنتصاب



طريقة عمل بدلة ZSI 100 القضيبيّة

إن مرونة البدلة القضيبيّة الإصطناعيّة ZSI 100 تجعلها سهلة الإستخدام. عند الرغبة بالحصول على إنتصاب، يمكن إجلال القضيب خلال ثوانٍ، لتصبح جاهزاً لممارسة الجنس. يمكن إبقاء بدلة ZSI 100 بحالة إنتصاب للمدة التي يرغبها المريض. يمكن للمريض أن يكمل ممارسة الجنس حتى بعد القذف إذا أراد ذلك. وعند الإنتهاء، يمكن إعادة البدلة ZSI 100 إلى شكلها غير-المنتصب.

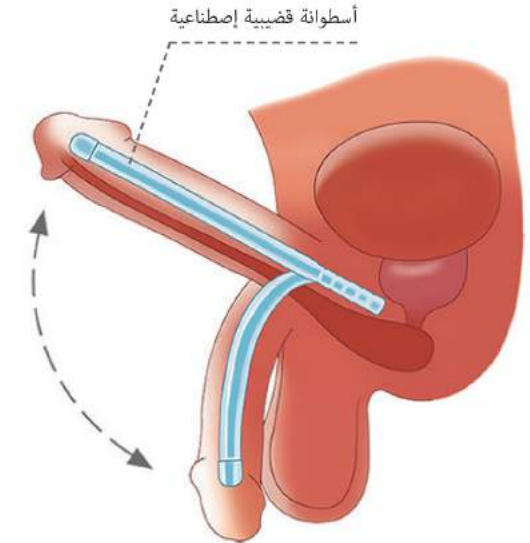

ZEPHYR Surgical implants is ISO 13485 : 2004
Malleable Penile Implant ZSI 100 is EC certified



Swiss Made

موزع محلي

Tel/Fax: +98 (21) 44025495
What's app: +98 (919) 206 9500
Info@robina-persia.ir



Robina
Group Companies

إن البدلة القضيبيّة الإصطناعيّة ZSI 100 قد تمّ تصميمها كعلاج بسيط للعجز الجنسي لدى الرجال. تتألف البدلة من أسطوانتين مرنتين يتم وضعهما في القضيب الذكري. يمكن تحقيق إنتصاب عبر تحريك الأسطوانتين إلى وضع الإنتصاب بسهولة. لا تؤثر البدلة ZSI 100 على القدرة على الإحساس في الحشفة

يتألف القضيب الذكري من ثلاث أقسام: الحشفة، الجسم الكهفي للقضيب، والإحليل الذي يمر في الجسم الكهفي

الحشفة، وتعرف أيضاً برأس القضيب، هي أكثر الأجزاء إحساساً في القضيب. الجسم الكهفي للقضيب هو المكان الذي يمر فيه الدم عادةً في القضيب ليسبب الإنتصاب. الإحليل هو الممر الذي يمر داخل الجسم الكهفي للمريض، وهو جزء من المسالك البولية.

يتألف الجسم الكهفي للقضيب من جزئين يشبهان الأسطوانتين، ملتصقتان ببعضهما فوق الإحليل. لدى الجسم الكهفي القدرة على احتواء الدم والوصول إلى حالة إنتصاب، ومن ثم إرتخاء. تحصل العنانة (ضعف الإنتصاب) عندما يفقد الجسم الكهفي للقضيب قدرته على الإنتصاب.

إن البدلة القضيبيّة الإصطناعيّة ZSI 100 هي حل سهل لمشكلة ضعف الإنتصاب لدى الرجال. تتألف البدلة القضيبيّة الإصطناعيّة ZSI 100 من أسطوانتين متبنتين، ولكن مرنتين، ويمكن ثنيهما بسهولة. يتم زراعة البدلة في القضيب، وتعد علاجاً سهلاً ومتكتماً للعجز الجنسي لدى الرجال.

يتم وضع الأسطوانتين في الجسم الكهفي للقضيب الذكري، على كل جانبي القضيب. لا يتم إزالة أي أنسجة لخلق مكان للبدلة، بل يتم وضعهما في فراغ موجود في الجسم الكهفي للقضيب حيث يمر الدم في الأحوال العادية لتحقيق الإنتصاب. لا تؤثر البدلة ZSI 100 على قدرة المريض على التبول أو القذف، كما أنها لا تؤثر على الإحساس الطبيعي في القضيب أو الحشفة.

